

## APPENDIX 2 RENGØRING AF STOLENHEDEN EFTER ENDT ARBEJDS DAG - BÅDE EFTER PATIENTBESØG OG FANTOMARBEJDE

---

**Stolen køres op!**

**Synligt blod aftørres med en sæbeserviet, derefter aftørres med en desinfektionsserviet.**

### HJÆLPEMIDLER

- Handsker (éngangshandsker)
- 3 sæbeservietter
- 1 håndklæde/viskestykke til aftørring af lampe og computerskærm

### ALLE OVERFLADER AFVASKES I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

#### Første sæbeserviet

---

- 1) Vandhane, skærmvæg, klinikbord, tastatur, skærm samt fronter på skabe og skuffer.  
Skærm tørres efter med tør klud.
- 2) Units overflader (inkl. lampe og diverse svingarme), indtil ca. 25 cm fra gulvet.  
Lampe tørres efter med tør klud.

#### Anden sæbeserviet

---

- 3) Top-ophængte instrumenter, hygiejnecover, instrumentbro, kontrolpanel, skærm, instrumentbakkeholder.

Hygiejnecover vaskes i opvaskemaskine 1 gang ugentlig eller ved synligt blod

#### Tredje sæbeserviet

---

- 4) Patientstolen, nakkestøtte, ryg, sæde.
- 5) Operatørstol, ryg, sæde.
- 6) Holder til vandkrus, vandkrusfylder, sugeslanger.
- 7) Skyl fontænen ved at trykke på tasten til fontæneskyl, derefter rengøres fontænen udvendige side.
- 8) De nederste 25 cm af patientsædet, fodstøtte på operatørstol, nederste 25 cm af unitstander og patientstol, fodkontakt.
- 9) Fodkontakt hænges op.
- 10) Den indvendige side af fontænen og vasken rengøres.

- Guldfang fra fontænen tages op og sendes til vask i sterilcentralen, nyt guldfang lægges på bakken.
- Trefunktionssprøjtes hylster afmonteres, vaskes og sprittes, hvorefter det placeres på instrumentbakken.
- Roterende instrumenter, scaler og trefunktionssprøjte placeres i instrumentskylleholder (placeret under fontænen).
- Begge sugeslanger monteres på adaptor til sugerenssystem. Efter gennemskylningen sættes sugeslanger på plads.

#### HUSK DESINFEKTION AF ALLE OVERFLADER NÆSTE DAGS MORGEN

