

## APPENDIX 2 RENGØRING AF STOLENHEDEN EFTER ENDT ARBEJDS DAG - BÅDE EFTER PATIENTBESØG OG FANTOMARBEJDE

---

Kør stolen op

**OBS. Fontænefilter (guldfang) og sugehaner skal være afleveret sammen med bakken**

### HJÆLPEMIDLER OG VÆRNEMIDLER

- Sæbeservietter
- Handsker

### RENGØRING:

---

- 1) Skærmvæg (øverste vandrette kant og lodrette sider), fronter på skabe og skuffer.
- 2) Unitstanders øvrige overflader (div. svingarme og lodrette flader indtil 25 cm fra gulvet).
- 3) De nederste 25 cm af unitstol, nederste 25 cm af unitstander, fodstøtte på operatørstol, og fodkontakt. Fodkontakt hænges op.
- 4) Indvendig side af fontænen og afløbshul i fontænen

### IGANGSÆTNING AF SKYLLEPROCEDURE:

---

- 5) Trefunktionssprøjtens hylster afmonteres og placeres på instrumentbakken. Roterende instrumenter, scaler og trefunktionssprøjte placeres i instrumentskylleholder (placeret under fontænen).
- 6) Sugelanger monteres på adaptor til sugerenssystem og gennemskylles.
- 7) Sugelanger sættes på plads

Gummimåtte (hygiejnecover) vaskes i opvaskemaskine 1 gang ugentlig eller ved synligt blod