

## APPENDIX 3: INSTRUMENT- OG APPARATUR-HÅNDBLAD

### AL INSTRUMENT- OG APPARATURHÅNDBLAD TAGER UDGANGSPUNKT I NIR

I NIR afsnit 9, side 22 opereres der med følgende udstyrskategorier:

- Ikke kritisk udstyr – kontakt med intakt hud – rengøring og desinfektion, hvis forurening
- Semikritisk udstyr – kontakt med ikke sterile slimhinder og ikke intakt hud - rengøring og desinfektion herunder også udstyr der har været berørt af hænder, som har været i kontakt med patienten
- Kritisk udstyr – kontakt med sterile hulrum eller sterilt væv – rengøring, desinfektion og sterilisation

Da de fleste procedurer i mundhulen indebærer risiko for brud på slimhinden anvendes hovedsagelig sterile instrumenter/udstyr

Instrumenter/udstyr	Rengøring	Desinfektion	Emballering før autoklaving	Autoklaving	Særlige bemærkninger
Aftryksskeer	Desinficerende opvaskemaskine		÷	X	Iblødsætning i enzymsæbe løsner alginat.
Aftrykssprøjter	Desinficerende opvaskemaskine		÷	X	Overskydende aftryksmateriale fjernes straks efter brug.
Alginatbæger til udrøringsmaskine	Kabinetvasker				
Aluminiumshætter	Desinficerende opvaskemaskine		÷	X	
Amalgampistoler (plast)	Desinficerende opvaskemaskine		+	X	Overskydende amalgam trykkes ud straks efter brug. Pistol skilles ad før vask.
Analgesiapparat inkl. tykke slanger og pose	Sæbeserviet	Desinfektionsserviet			Kontrollér at røde mærker på mano-metrene er intakte; fejl/mangler rapporteres til Værkstedet (Lars og Claus).
Analgesimasker, mellemstykke + korte slanger	Desinficerende opvaskemaskine		÷	X	
Beskyttelsesskjold til lyspolymerisering (Cureshields)	Sæbeserviet	Desinfektionsserviet			Eftertørres
Bor, diamanter, fræsere, grønne sten m.m.	Desinficerende opvaskemaskine		÷	X	
Bor til diverse stifter	Desinficerende opvaskemaskine		+	X	X-system. Må kun autoklaveres 8 gange.

Instrumenter/udstyr	Rengøring	Desinfektion	Emballering før autoklavering	Autoklavering	Særlige bemærkninger
Centreringskive til røntgenfilmholder	Sæbeserviet	Desinfektionsserviet			
Capmixe kapselblander (Silimat)					Sæbeserviet én gang dagligt.
Cofferdamshultænger	Sæbeserviet	X - 70% sprit			I plastpose efter rengøring og desinfektion.
Ekstraktionstænger	Desinficerende opvaskemaskine		+	X	
El-motorer og ledning	Sæbeserviet	Desinfektionsserviet	+	X	
Elektroder til elektrokirurgi	Desinficerede opvaskemaskine		+	X	
Elektrokirurgiapparat	Sæbeserviet	Desinfektionsserviet			
Etching gel sprøjte	Sæbeserviet	Desinfektionsserviet			Brugt kanyle i risikoboks. Ved udtrykning af gel, vær opmærksom på ikke at ramme hud, øjne og tøj. Brug beskyttelsesbriller.
Fantomhoved	Sæbeserviet				
Filmholdere til røntgen	Desinficerende opvaskemaskine		÷	X	
Fotospejle	Kogning i sæbevand i mikroovn	X – 70% sprit			Efter rengøring, polering i plastikæske.
Glasplader til udrøring	Manuel rengøring med sæbevand	X – 70% sprit			
Grønne gummiskåle	Manuel rengøring med sæbevand				I indleveringen på klinikken.
Guldfang	Kabinetvasker	Desinfektionsserviet			
Gummiskiver grå/sort	Desinficerende opvaskemaskine		÷	X	
Hånd-/vinkelstykker				DAC (X)	Blod fjernes med sæbeserviet før DAC.
Håndtag til engangsskeer	Desinficerende opvaskemaskine		÷	X	
Instrumenter, enkeltvis/kassetter	Desinficerende opvaskemaskine		+	X	Pochedybdemåler tåler ikke ultralyd.
Implantatkit	Desinficerende opvaskemaskine		+	X	Følg producentens anvisninger.
Hvid plastbakke	Sæbeserviet	Desinfektionsserviet			
Ivansonmålere, linealer, skydelære	Desinficerende opvaskemaskine		÷	X	

Instrumenter/udstyr	Rengøring	Desinfektion	Emballering før autoklavering	Autoklavering	Særlige bemærkninger
Kindholdere (foto)	Manuel rengøring med sæbevand	X – 70% sprit			
Lyspolymeriseringsstav	Desinficerende opvaskemaskine				ELLER rengøring med sæbeserviet og dernæst desinfektionsserviet.
Matriceholdere	Desinficerende opvaskemaskine		+	X	
Odontosonspidser i holder	Desinficerende opvaskemaskine		+	X	
Ortodontisk udstyr, bånd, brackets, etc.	Desinficerende opvaskemaskine		÷	X	
Ortodontitænger	Desinficerende opvaskemaskine		÷	X	Koges 5 min. i sæbevand i mikrobølgeovn, hvis tangen ikke tåler autoklavering.
Passere	Sæbeserviet	Desinfektionsserviet			
Pincetholdere	Desinficerende opvaskemaskine				
Plastdispenser/plastpistol	Sæbeserviet	Desinfektionsserviet			
Proteseskåle (metal)	Desinficerende opvaskemaskine				
Proxictorer	Desinficerende opvaskemaskine		÷	X	
Pulpatest-apparat	Sæbeserviet	Desinfektionsserviet			
Pulpatestspidser + stave	Desinficerende opvaskemaskine		÷	X	
Rodfile / ex-nåle m.m.	Desinficerende opvaskemaskine		+	X	Må autoklaveres 5 gange. Lav markering for hver gang.
Røntgenapparat inkl. patientstol	Sæbeserviet	Desinfektionsserviet			Dog ikke desinfektionsserviet på stol. Fejl og mangler rapporteres til Værkstedet.
Skannerapparat til digital røntgen					Sæbeserviet én gang dagligt.
Skannerapparat til aftrykstagning	Sæbeserviet	Desinfektionsserviet			
Skannerhoveder	Sæbevand med blød børste, skylles derefter	Nedsænkes i det af firmaet anbefalede desinfektionsmiddel*			
Sonicflexspidser	Desinficerende opvaskemaskine		÷	X	
Sonicflex tandrensingsapparat	Sæbeserviet	Desinfektionsserviet			
Spidser m. plastfyldningsmateriale	Sæbeserviet	Desinfektionsserviet			
Sug, grå mellemstykke	Desinficerende opvaskemaskine				Adskilles før desinficerende opvaskemaskine. Smøres 1 x dagligt.

Instrumenter/udstyr	Rengøring	Desinfektion	Emballering før autoklaving	Autoklaving	Særlige bemærkninger
Tandtrådsholdere / tandtrådsførere	Desinficerende opvaskemaskine		÷	X	
Tubulesprøjte	Desinficerende opvaskemaskine		+	X	
Udrøringsspatler	Kabinetvasker	Desinfektionsserviet			
Andet flytbart udstyr	X	X			Eller følg anvisningen ved maskinen

Ultralyd kan anvendes ved fastsiddende materiale.

\* Selv om fabrikanten anbefaler autoklaving, udelades dette, fordi der er tale om semi-kritisk udstyr.