

APPENDIX 6: INSTRUMENTHÅNDBTERING

Al instrumenthåndtering tager udgangspunkt i NIR
Brug altid handsker og tang/pincet ved håndtering af forurenede instrumenter

| Instrumenter/udstyr | Desinficerende opvaskemaskine | Autoklivering | Særlige bemærkninger |
|---|-------------------------------|---------------|---|
| Alginat-bæger til udrøringsmaskine | | | Kabinetvasker. |
| Aftryksskeer | X | X | Iblødsætning i enzymsæbe løsner alginat. |
| Aftrykssprøjter (metal) | X | | Overskydende aftryksmateriale fjernes straks efter brug. |
| Aluminiumshætter | X | X | |
| Amalgampistoler (plast) | X | X | Overskydende amalgam trykkes ud straks efter brug. Pistol skilles ad før vask. |
| Analgesislanger + poser | | | Rengøres manuelt med sæbevand, ophænges til tørring og pudres udvendigt. |
| Analgesimasker + korte slanger | X | X | |
| Bidetænger/passere | | | Koges 5 minutter med sæbe i mikroovn. |
| Bor, diamanter, fræsere, grønne sten m.m. | X | X | |
| Bor til diverse stifter | X | X | X-system. Må kun autoklaveres 8 gange. |
| Borudtagere | X | X | |
| Cofferdamshultænger | | | Rengøres manuelt med sæbevand, sprittes med 70% sprit og pakkes i plastpose. |
| Ekstraktionstænger | X | X | |
| El-motorer og ledning | | | Rengøres manuelt med sæbevand. |
| Elektroder til elektrokirurgi | X | X | |
| Filmholdere til røntgen | X | X | Indpakkes ikke |
| Fotospejle | | | Rengøres manuelt med sæbevand. Poleres med 70% sprit. Kommes i filtpose. |
| Glasplader til udrøring | | | Rengøres manuelt med sæbevand. Poleres med 70% sprit. |
| Grønne gummiskåle | | | Rengøres manuelt med sæbevand i indleveringen på klinikken. |
| Guldfang | X | | Kabinetvasker. |



| Instrumenter/udstyr | Desinficerende opvaskemaskine | Autoklivering | Særlige bemærkninger |
|--|-------------------------------|---------------|--|
| Gummiskiver grå/sort | X | X | |
| Hånd-/vinkelstykker | | DAC (X) | |
| Håndtag til engangsskeer | X | X | |
| Instrumenter, enkeltvis / i kassetter | X | X | Pochedybdemåler tåler ikke ultralyd. |
| Implantatkit | X | X | Følg producentens anvisninger. |
| Hvid plastbakke | | | Rengøres med sæbeserviet og dernæst desinfektionsserviet. |
| Ivansonmålere, linealer, skydelærer | X | X | |
| Kindholdere (foto) | X | | Kan også vaskes manuelt og desinficeres med 70% sprit. |
| Lyspolymeriseringsstav | X | | Dental opvaskemaskine ELLER rengøring med sæbeserviet og dernæst desinfektionsserviet. |
| Matriceholdere | X | X | |
| Odontosonspidser i holder | X | X | |
| Ortodontisk udstyr, bånd, brackets, etc. | X | X | |
| Ortodontitænger | X | X | Kogning i mikrobølgeovn, hvis tangen ikke tåler autoklivering. |
| Pincetholdere | X | | |
| Proteseskåle (metal) | X | | |
| Proxitectorer | X | X | |
| Pulpatestspidser + stave | X | X | |
| Rodfile / ex-nåle m.m. | X | X | Må kun autoklaveres 5 gange. Lav markering for hver gang. |
| Sonicflexspidser | X | X | |
| Sug, grå mellemstykke | X | | Adskilles før rengøring 1 x daglig smøres efter rengøring. |
| Tandtrådsholdere / tandtrådsførere | X | X | |
| Tubulesprøjte | X | X | |
| Udrøringsspatler | X | | |

Ultralyd kan anvendes ved fastsiddende materiale.