



APPENDIX 3: RENGØRING/DESINFEKTION AF APPARATUR M.V.

Emner	Efter brug	Særlige bemærkninger
Analgesiapparat	Aftørres med desinfektionsserviet.	Kontrollér at røde mærker på manometrene er intakte; ved fejl eller mangler rapportér til værkstedet (Finn og Lars).
Beskyttelsesskjold til lyspolymerisering (Cureshield)	Vaskes i opvaskemaskine eller aftørres med desinfektionsserviet og eftertørres.	
Capmixe kapselblander (Silimat)	Aftørres med desinfektionsserviet.	
Echting gel-sprøjte	Brugt kanyle kasseres (risikoboks). Sprøjten aftørres med desinfektionsserviet.	Ved udtrykning af gel, vær opmærksom på ikke at ramme hud, øjne og tøj. Brug beskyttelsesbriller.
Elektrokirurgiapparat	Apparatet afvaskes i sæbevand.	Elektroderne behandles jf. 'Instrumentrengøring'.
Fantomhoved	Aftørres med desinfektionsserviet eller sæbevand.	Amalgamrester suges op via sug.
Lyspolymeriseringslampe	Aftørres med desinfektionsserviet. Ved evt. fastsiddende plastmateriale sættes staven i blød i hospitalssprit 70 % ca. 5 minutter.	Vær opmærksom på, at væske ikke løber ind i apparatet. Undlad at ridse den polerede overflade på staven.
Pulpatester	Aftørres med desinfektionsserviet.	Stav + gummispidser rengøres jf. 'Instrumentrengøring'.
Røntgenapparat incl. patientstol	Tubus, håndur, kontakt og patientstol aftørres med desinfektionsserviet.	Apparatet incl. tubus, håndur, kontakt og patientstol afvaskes dagligt med sæbeklud. Ved fejl eller mangler rapportér til Værkstedet.
Skanner til digital røntgen	Aftørres med sæbevand 1 gang/dagligt.	Poserne afsprittes inden de åbnes og den digitale røntgenfilm tages ud. Papcover, der beskytter filmen, genbruges.
Soniflex tandrensning-instrument	Aftørres med desinfektionsserviet eller sæbevand.	Spidserne rengøres jf. 'Instrumentrengøring'.
Spidser med plastfyldningsmateriale	Brugte, men ikke tømte spidser desinficeres.	
Andet flytbart udstyr	Aftørres med desinfektionsserviet eller følg anvisningen ved maskinen.	