

Appendix 8 – Kontrol af autoklaver - Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Autoklaverne kontrolleres i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), hvortil der henvises (pkt. 14.9.3).

Præcision af NIR:

Hver kørsel: kontrol som beskrevet i NIR.

Daglig kontrol:

Hver morgen køres type B autoklaver (autoklaver med vakuum) i sterilcentral og på klinikafsnit med én gke helix test (blå) i tomt autoklavekammer.

Én gang dagligt medtages 1 TST strips i type S autoklaver (specialautoklaver til roterende instrumenter, DAC).

Hver 3. måned anvendes sporeprøver

Der anvendes 1 sporeprøve i gke helix test (grøn) i sterilcentralens type B autoklaver

Der anvendes 1 sporeprøve i gke helix test (grøn) i klinikkernes type B autoklaver

Der anvendes 1 i klinikkernes type S autoklaver (DAC)

Lækageprogram for type B autoklaver køres iflg. producentens anvisninger.

Hygiejneudvalget 2020